

Visit Babyvakt

BE1491-868



Egenskaper

Pålitelig radiotilkobling
Opp til 250 m rekkevidde

Fleksibel
Justerbar følsomhet & forsinkelse

Trygg og sikker
Barnsikker batteriluke

Fungerer med tråkkematten
Varsler hvis barnet går ut av sengen

Lett å bruke
Tar kun få minutter å sette opp

MD

CE-merket medisinsk enhet i henhold til EU MDR 2017/745

Alltid nær ditt barn

Som forelder setter du ditt barns helse og sikkerhet foran alt annet. Bellman & Symfon tilbyr en babyvaktløsning som hjelper deg med nedsatt hørsel å holde ekstra vakt på din baby. Den varsler deg så fort ditt barn trenger deg og fungerer like bra om du sover eller befinner deg i et annet rom.

Slik fungerer den

Når barnet våkner og begynner å gråte, sender babyvakten et varsel til din Visitmottaker som viser med lyd, lys eller vibrasjon at barnet trenger deg.

Sikker og pålitelig

Babyvakten bruker en sikker radiotilkobling som dekker hele huset så du er til stede hele tiden.

Justerbar følsomhet og forsinkelse

Du kan enkelt justere følsomhet og forsinkelse så den ikke aktiveres ved feil når din baby beveger seg i søvnen.

Valgbart signal

Hvis du har flere barn kan du stille inn individuelle signaler slik at du vet hvem trenger din oppmerksomhet..



Teknisk informasjon




Mål og vekt

Høyde: **100 mm**
Bredde: **65 mm**
Dybde: **27 mm**
Vekt: **118 g inkl. batterier**



Knapper og tilkoblinger

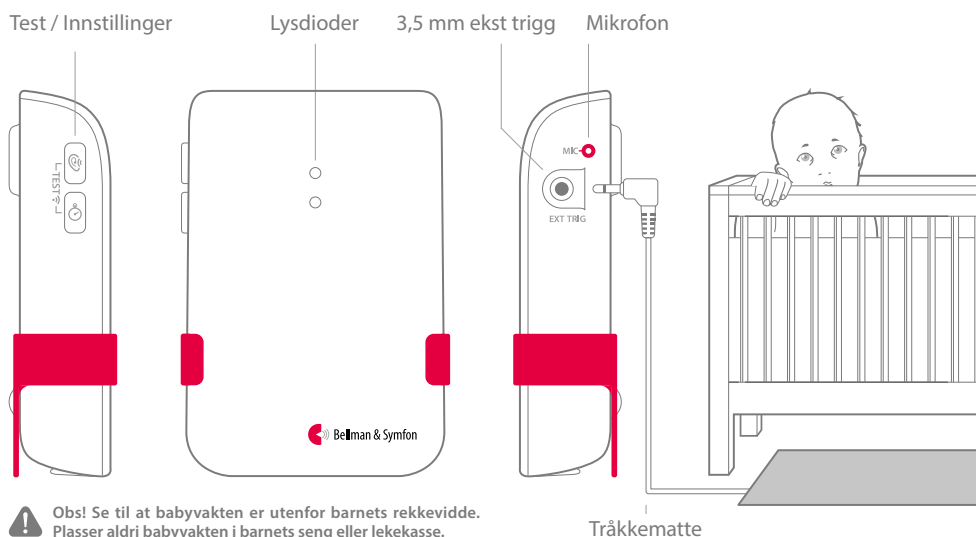

Tilkoblinger

- 3,5 mm ekstern triggerinngang

Aktivering

- Testknapper
- Intern mikrofon og tilkoblet tråkkematte

Instillinger

- Følsomhet: Høy, Medium, Lav
- Forsinkelse: 30 s, 10 s, 1 s

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Den reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

Godkjenninger



Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

Strøm og batteri

- Strømforsyning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkalisk
- Strømforbruk
Aktiv < 70 mA, Dvale < 400 µA
- Driftstid
Alkalisk batteri ~ 6 mnd Lithiumbatteri ~ 1 år

Antall radionøkler

- 64. Kan utvides til 256 med programvare.

Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Ikke bruk rengjøringsmidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniak eller slipemidler.
- Ikke for resirkulering

Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % - 90 % (ikke kondenserende)

I esken

- BE1491-868 Visit Babyvakt
- Bordstativ
- 2 x 1.5V AA alkaliske batterier
- Skrue og plugg
- Bruksanvisning



Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig:

- BE9026-P02 Tråkkematte

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.
Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1491-868_001DSH1.0-NO

bellman.com